

Gronings Tandtechnisch Laboratorium

CLEARFIL™ ESTHETIC CEMENT

Cementeren van de restauratie:

1. Het schoonmaken van de preparatie
Maak het hechtoppervlak van het element schoon. Alleen op onbeslepen glazuur moet K-etchant GEL aangebracht worden en gedurende 10 seconden inwerken. Hierna het hechtoppervlak goed schoonspoelen en vervolgens droogblazen.
2. Behandelen van het hechtoppervlak
Meng 1 druppel ED PRIMER II A met 1 druppel ED PRIMER II B in het mengbakje. Breng ED PRIMER II aan op het hechtoppervlak van het element en laat dit 30 seconden inwerken. Blaas vervolgens het oppervlak droog met een zachte luchtstroom. Niet uitharden!
 - Bij een edelmetalen stomp dient eerst ALLOY PRIMER op het oppervlak aangebracht te worden. Daarna ED PRIMER II aanbrengen over het gehele oppervlak.
 - Bij een composiet stomp dient eerst K-etchant GEL te worden aangebracht, 5 sec. inwerken, spoelen en drogen, breng daarna CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER op het oppervlak aan. Breng hierna ED PRIMER II aan op het gehele oppervlak.
3. Aanbrengen van CLEARFIL™ ESTHETIC CEMENT: Druk voorzichtig CLEARFIL™ ESTHETIC CEMENT PASTA A en B uit de doseerspuit en breng op de restauratie aan (niet op het element).
4. Cementeren van de restauratie
Cementeer de restauratie.
5. Verwijderen van overtollig nog vloeibaar cement:
Verwijder overtollig PASTA A en B mengsel bij de randen met een borsteltje.
6. Uitharden van het cement
Polymeriseer PASTA A en B langs de rand van het cement met een tandheelkundige polymerisatielamp.
7. Verwijderen van overtollig uitgehard cement
Verwijder met behulp van een sonde of kleine scaler de overmaat aan uitgeharde CLEARFIL™ ESTHETIC CEMENT.
8. Afwerken.