

# Gronings Tandtechnisch Laboratorium

## CLEARFIL™ SA CEMENT

### *Cementeren van de restauratie*

1. Het schoonmaken van de stomp. Maak het hechtoppervlak van de stomp schoon.
2. Aanbrengen van CLEARFIL™ SA CEMENT  
Druk voorzichtig CLEARFIL™ SA CEMENT uit de doseerspuit en breng op de restauratie aan (niet op het element). Indien de pasta in het wortelkanaal wordt aangebracht met de Endotip moet u binnen 40 seconden na aanbrengen van het cement starten met stap 1.
3. Cementeren van de restauratie  
Breng de pasta aan op de restauratie (niet op het element) en cementeer de restauratie.
4. Verwijder het overtollige cement.  
Verwijder het overtollige cement via één van de twee volgende methoden:
  - Lichtuitharding: belicht de restauratie met een poly-merisatielamp gedurende 2 tot 5 seconden en verwijder het overtollige cement.
  - Chemische uitharding: wacht 3 tot 5 minuten na het plaatsen en verwijder het overtollige cement.
5. Eindbehandeling  
Werk de restauratie af via één van de twee volgende methoden:
  - Opaque restauratie (bv. metaal). Houd de restauratie 5 minuten geïsoleerd.
  - Transparante restauratie (bv. keramiek). Hard met een polymerisatielamp het gehele restauratie oppervlak en de randen uit volgens onderstaande tabel.

### *Lichtuithardingstijd voor tandheeskundige polymerisatielampen:*

Tandheeskundige polymerisatielamp:	Lichtuithardingstijd:
Conventioneel halogen	20 seconden
LED	20 seconden
Snel halogen	10 seconden
Plasma arc	10 seconden